



Kort Manual

Våginstrument 750

Rev 2009-02-19-

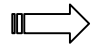
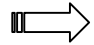
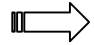
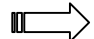


Installation

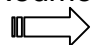
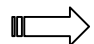
Allmänt

Denna våg är endast avsedd för användning inomhus.

Montering

-  Placera vågen på ett jämnt och fast underlag
-  Montera våginstrumentet.
-  Anslut kontakten bakpå våginstrumentet.
-  Starta instrumentet med knappen **ON**.

Nedmontering

-  Stäng av vågen med knappen **OFF**.
-  Tag bort kontakten bakpå våginstrumentet.

Batteridrift

Viktindikatorn drivs av 6 st batterier som placeras innanför luckan på baksidan av instrumentet. Batterierna kan vara vanliga alkaliska standardbatterier eller laddningsbara NiCad eller NiMH batterier.

Observera att alla sex batterierna måste vara av samma typ.

OBS! Det kan vara farligt att blanda laddningsbara och alkaliska batterier.

Om du vill använda laddare till vågen **MÅSTE** batterierna vara laddningsbara.

Installera batterier

- Stäng av våginstrumentet.
- Skruva loss och öppna batteriluckan.
- Kontrollera polariteten och sätt i batterierna.
- Montera tillbaks batteriluckan.

Batterispänning

När batterispänningen understiger en viss nivå tänds en indikator i vänstra hörnet av displayen. Om spänningen fortsätter att sjunka kommer instrumentet att stänga av sig automatiskt. Vid uppstart av instrumentet visar displayen battery , därefter visas batterispänningen i procent av full batterispänning. För att förlänga batteriernas livslängd finns två ställbara sparfunktioner , Automatisk avstängning och Viloläge.

Knappfunktioner

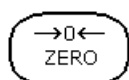
OBS! Knapparna får ej manövreras med vassa eller spetsiga objekt. Skador på tangentbordet omfattas ej av garantin.



På/AV

Denna knapp har två (2) funktioner.

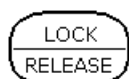
- Startar våginstrumentet om det är avstängt.
- Stänger av våginstrumentet om det är på.



Nollställning

Nollställer visad vikt om den är inom nollområdet.

- Nollområdet är begränsat till 4 % av vågens kapacitet.
- Vid ostabil vikt ignoreras kommandot.



Hållfunktion

Denna knapp har två (2) funktioner.

- Om funktionen **HOLD** är aktiverad, stannar viktvisningen när man trycker på knappen. Efter ytterligare ett tryck återgår instrumentet till normal viktvisning.
- Om funktionen **AUTO HOLD** är aktiverad, stannar viktvisningen automatiskt i det ögonblick vikten är stabil. Tryck på knappen för att påbörja en ny vägning.



BMI/ENTER

Denna knapp har många funktioner . Först använder man den under installationen och när man anger parametrarna. (Detta behöver inte de svenska användarna göra eftersom vågen levereras med alla inställningarna klara).

För det andra används den för att signalera att man fört in data (enter) och signalerar på så sätt att indikatorn kan börja sina beräkningar. Tex när man fört in höjden för att beräkna BMI.

Pil-knapparna

Pilknapparna som omringar BMI/ENTER knappen används för att höja eller sänka längvärdena under BMI beräkning.

Att använda vågen....

Batterier

OBS! Blanda aldrig Laddningsbara batterier med vanliga. Använder man laddare i kombination med batterier MÅSTE det vara laddningsbara batterier, annars är det risk för att våginstrumentet går sönder.

För att väga

1. Tryck på ON/OFF knappen för att starta vågen.
2. Tryck ZERO för att nollställa vågen.
3. ZERO och kg indikatorn syns på för att visa att vågen är klar för användning.
4. Placera patienten på vågen och avläs vikten.
5. Klart. Nu kan patienten gå av/stiga ur vågen.

OBS! Om ni har en stolvåg, trampa inte på fotstödet utan fäll ner det efter att patienten satt sig ner och fäll upp det efter urstigning. Annars kan det knäckas.

För att mäta BMI

1. Tryck på **ON/OFF** knappen för att starta vågen.
2. Tryck på **ZERO** knappen för att nollställa vågen. ZERO och kg indikatorn syns för att visa att vågen är klar för användning.
3. Placera patienten på vågen och avläs vikten.
4. Tryck på **BMI/ENTER** knappen.
5. Displayen visar 170 cm. (0:an blinkar)
 - a. Tryck pil upp eller pil ner tills rätt siffra visas.
 - b. Tryck pil vänster eller pil höger för att flytta markören till nästa siffra.
 - c. Repetera steg A och B tills rätt längd visas.
6. Tryck på **BMI/ENTER** knappen.
7. Nu kan BMI talet avläsas på displayen
8. Patienten kan gå av/ stiga ur.
9. Tryck på **BMI/ENTER** knappen för att återvända till ny vägning.

Rengöring av vågen:

Använd inga lösningsmedel typ aceton eller thinner på våginstrumentet.
Häll eller spruta **inte** vatten direkt på instrumentet.

Använd en fuktig trasa med något icke frätande rengöringsmedel för att rengöra instrumentet.